

**OBJETIVO**

Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio de COVID-19.

**PROCEDIMIENTO SEGURO**

- \* El control de temperatura se realizará al personal al iniciar la jornada laboral y al ingreso de visitantes.
- \* En el caso de que la temperatura del lugar en donde se ha mantenido guardado el termómetro sea muy diferente a la temperatura del lugar donde se va a hacer la medición, se debe esperar 10 minutos, para que la temperatura del termómetro quede equilibrada con la temperatura ambiente.
- \* Si los resultados de la medición se encuentran entre color naranja y rojo, la persona deberá ser retirada inmediatamente del área de trabajo y ser reportado a SST, para gestionar el traslado a casa.

		
<p>Verifique que tenga las pilas y que el sensor este limpio.</p>	<p>Sujételo fuertemente y encienda, oprimiendo el botón ON.</p>	<p>Indique al colaborador que cierre los ojos y apunte con el termómetro en parte lateral de la cabeza "sien" a una distancia de 15 cm y mantenga oprimido el botón ON de encendido.</p>
		
<p>Espere que arroje el resultado en la pantalla LCD (0,5 segundos obtener el resultado de medición).</p>	<p>Interprete el resultado indicado en la pantalla LCD. Temperatura normal la luz es verde, naranja fiebre leve y la roja fiebre alta.</p>	<p>El termómetro se apagará automáticamente.</p>

VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS	FECHA
2	Cambia el nombre y la zona de ubicación del termómetro para medición de la temperatura	jun-20
1	Elaboración del documento	abr-20